

Comment activer le partage des données sur myDiABBY ?



EkiYou®
by DiappyMed


Guide de prescription et partage des données

1 Le patient active le partage des données **Étape Patient**

Option 1 - Depuis EkiYou® après la saisie du code de prescription



Option 2 - Depuis son compte myDiabby Healthcare dans "Mes objets connectés" puis "Applications santé", le patient sélectionne EkiYou® et se connecte à son compte EkiYou®

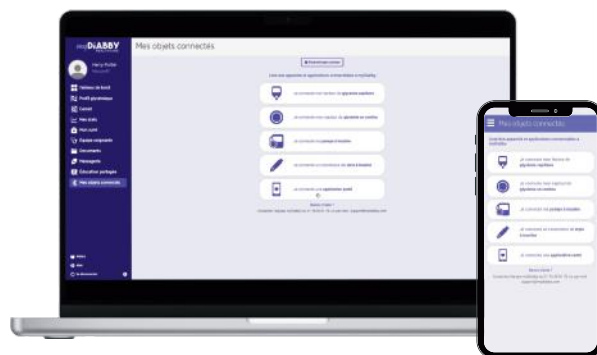

2 Vous avez accès aux données

Les données du patient (doses d'insuline et données associées : glycémies, glucides, paramètres de bolus et activité physique) se synchronisent automatiquement dans le dossier patient

3 Télésurveillance

Vous pouvez, si nécessaire, prescrire la télésurveillance sur myDiabby Healthcare à votre patient

Support myDiabby Healthcare

✉ support@mydiabby.com ☎ 01 76 40 01 78 (du lundi au vendredi de 9h à 17h)

Support DiappyMed


✉ ekiyou@diappymed.com ☎ 04 11 93 88 06 (du lundi au vendredi, de 9h à 18h)

Ekiyou est un dispositif médical de classe IIb marqué CE (1912), lire attentivement les instructions d'utilisation disponible via : <https://diappymed.com/ekiyou001ifu/>. Ce contenu est promotionnel - Ext_U_FR_EkiYou_MemoPrescriptionMyDiabby_100726_V01

07/2026 - myDiabby Healthcare est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par MDHC et destiné à la télésurveillance des patients atteints de diabète. Lire attentivement la notice, CE 0459. Le DMN de télésurveillance myDiabby Healthcare est remboursé sur la liste L162-52 du Code de la Sécurité Sociale dans les indications suivantes: "Télésurveillance des patients diabétiques de type 1, type 2 et patientes atteintes de diabète gestationnel". myDiabby Healthcare est une application publiée par MDHC SAS - 66 Avenue des Champs Élysées - 75008 Paris - France - S.A.S. au capital de 1000€ - 834 031 965 au R.C.S. Paris




myDiABBY
HEALTHCARE

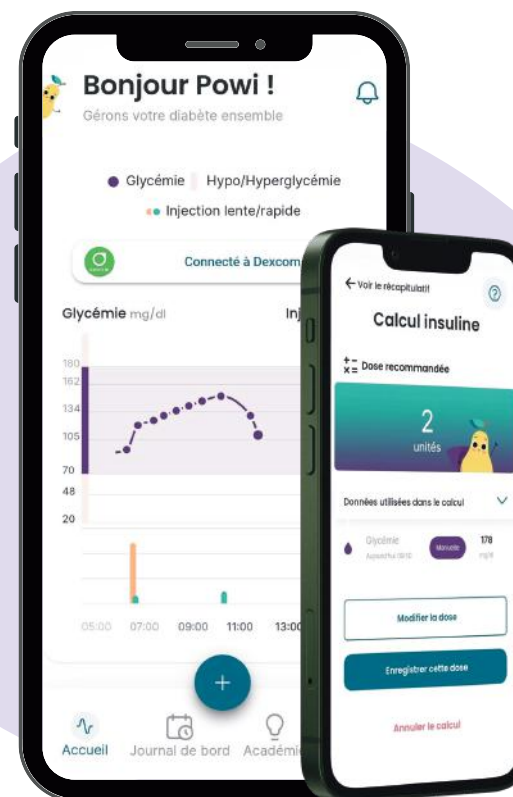

Prescrire EkiYou® via la plateforme myDiABBY HEALTHCARE

1 Connectez vous à votre compte myDiABBY et rendez-vous dans l'onglet "Documents"

- Ouvrez le dossier du patient concerné
- Cliquez sur "Nouveau document" puis "Ordonnance EkiYou"

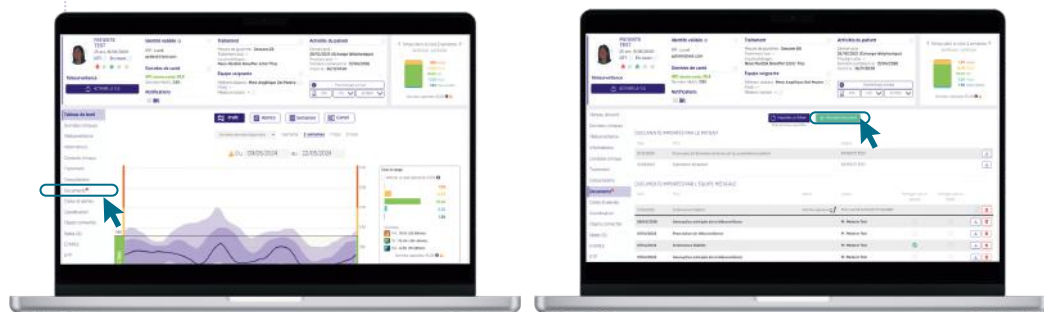


2 Saisissez les informations demandées

- Indiquez la durée de prescription (3 mois pour une primoprescription ; 6 mois pour un renouvellement)
- Cochez la case après avoir obtenu l'accord du patient concernant la transmission des informations à EkiYou®.
- Cliquez sur "Suivant"

3 Vérifiez le contenu de l'ordonnance

- Cliquez sur "Signer et valider l'ordonnance"
- Retrouvez l'ordonnance signée dans la liste "Documents importés par l'équipe médicale".

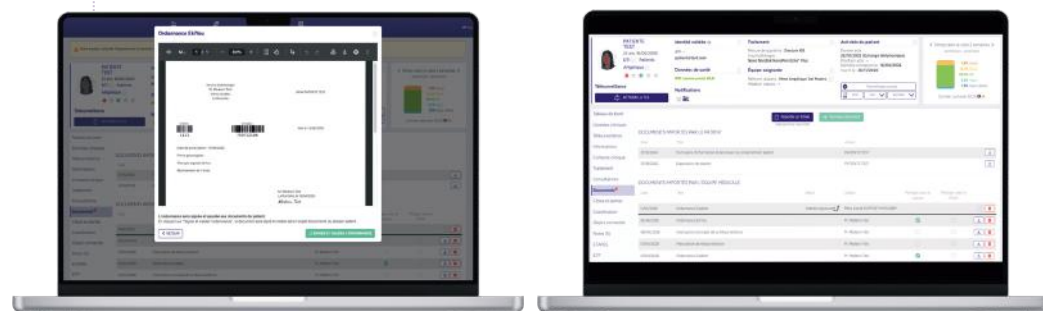

4 Le patient active son accès **Étape Patient**

- Il reçoit un email d'activation contenant un code
- Le patient télécharge EkiYou® depuis les stores, crée un compte puis saisit ce code directement dans EkiYou®.

